

MK-010A  
MK-010A

제품 사용 설명서

FreeMax  
FreeMax

## 【MK-010A FreeWAV 제품 사용 설명서】

본 제품을 구매 해 주셔서 감사 드립니다.

본 제품을 사용하기 전 반드시 설명서를 주의 깊게 읽어 주시고, 설명에 따라 올바르게 사용 해 주시기 바랍니다.

해당 설명서는 손, 망실의 우려가 없도록 보관 해 주시고, 제품 사용 시 반드시 설명서를 읽고 사용 해 주시기 바랍니다.

해당 설명서는 제조업체의 홈페이지 [www.buheungmedical.com](http://www.buheungmedical.com) 에서 다운로드 할 수 있습니다.

본 설명서는 **품질 보증서**를 포함하고 있습니다.

본 제품의 품질 보증 기간은 **1년**입니다.

해당 제품 사용 중 제품에 이상이 있는 경우 즉시 사용을 중지하시고 판매처 또는 제조사에 문의 해 주시기 바랍니다.

해당 제품 사용으로 예상치 못한 부작용이 발생하였을 경우 즉시 사용을 중지하시고 판매처 또는 제조사에 문의 해 주시기 바랍니다.

제조사는 사용 목적 이외의 용도, 사용 방법 미숙, 또는 고의로 인한 파손 등 소비자 과실로 인한 제품의 파손, 및 기타 손해 등에 대한 책임이 없습니다.

**본 제품은 의료기기입니다.**

### 【의료기기 법에 따른 기재 사항】

제품명: FreeWAV

품목명: 3등급 의료용 조합 자극기 (고주파 자극기, 저주파 자극기)

모델명: MK-010A

사용 목적: 통증 완화, 근육통 완화

품목 허가 번호: 제허 15-1332호

제조원: 부흥메디칼

제조 허가 번호: 제 699호

제조원의 주소: 서울시 금천구 벚꽃로 176

제조원의 연락처: 02) 838-5866

버전(Version):  
V20180823

## 【제품의 구성】

제품을 사용 하기 전, 제품의 구성품을 확인 해 주시기 바랍니다.

### 1) 제품 본체



### 2) 전극 (패드)부 (총 6 종)

① 복부 전용 전극



② 발 전용 전극



③ 손 전용 전극



④ 가슴 전용 전극



⑤ 다리 전극 (다목적)



⑥ 팔 전극 (다목적)



### 3) 밴드부

① 소형 밴드 x 2개



② 중형 밴드 x 2개



### 4) 주변 기기

① 전용 충전 아답터



② 보관용 가방



③ 설명서

## 【제품 사용 시 주의 사항】

- ① 의사의 처방에 따라 사용합니다. 제품의 오용은 통증을 유발 할 수 있습니다.
- ② 강한 충격을 가하지 않습니다. 충격으로 기능이 손상된 경우 제품을 사용 하지 마세요.
- ③ 기기의 본체 및 전극, 주변 기기는 물에 담그면 고장의 원인이 됩니다. 에틸 알콜 등 소독액을 묻힌 거즈로 닦아내십시오.
- ④ 본체를 임의로 분해하여서는 안 됩니다. 고장이 의심되면 본사 및 서비스 센터에 연락 하여 수리를 받으십시오.
- ⑤ **전극 사용의 주의:** 사용 후 적절한 보관 및 관리 방법에 따라 반드시 세척하여야 합니다. 그렇지 않을 경우 세균에 오염 될 수 있습니다. 오염된 전극을 사용할 경우 감염 등 부작용이 있을 수 있습니다.
- ⑥ 인공 심장 박동기의 착용자에게 사용을 금합니다. 심장 박동기의 전기 신호가 방해 받을 수 있습니다.
- ⑦ 심장 부위의 사용을 금합니다. 전극은 전기를 발생시키므로 심장에 무리를 줄 수 있습니다.
- ⑧ 임신부에게 사용을 금합니다. 전극의 출력이 태아에게 해로울 수 있습니다.
- ⑨ 동반 질환이 있는 경우(정신과적 질환 등) 사용을 금합니다.
- ⑩ 알려지나 세균에 의한 질환이 있을 경우 사용을 금합니다.
- ⑪ 전극을 사용 할 경우 사용 부위에 충분히 젤을 바르십시오. 그렇지 않으면 따가움을 느낄 수 있으며, 피부에 손상을 가져올 수 있습니다.
- ⑫ 손상된 피부에 사용하지 마십시오.
- ⑬ 인공 관절을 이식한 부위에는 사용하지 마십시오.
- ⑭ 사용 중 신체에 이상을 느끼거나 피로함을 느끼는 경우 사용을 중지하십시오.
- ⑮ 화면을 터치할 때는 강하게 누르지 마시고, 여유를 두고 터치 해 주시기 바랍니다. 오작동을 방지하기 위해 모든 터치 기능은 터치 즉시 실행되지 않습니다.

## [제품의 사용 방법]

### [충전하기]

① 제품 본체의 상단에는 전원 버튼, [충전 연결부], 전극 연결부, 복부 전극 연결부가 있습니다.



② 전용 충전 아답터를 플러그에 꽂고 수직으로 본체의 아답터 연결부에 아답터를 연결합니다.

※ 아답터 및 전극을 연결하실 때에는 지정된 정확한 위치에 연결 해 주시기 바랍니다.

※ 소비자의 연결 부주의로 인한 파손에 의한 수리는 수리 비용이 청구됩니다.



③ 충전이 진행되는 동안 제품은 작동하지 않습니다.

④ 충전 관련 아이콘

|  |                |
|--|----------------|
|  | 배터리 없음. 충전 요망. |
|  | 충전 중.          |
|  | 충전 완료.         |



## [전원 켜기]

① 제품의 상단 한쪽 끝에 [전원 버튼]이 있습니다.



② 전원 버튼을 약 1.5초 간 누르고 있으면 전원이 켜지며 제품 상단에 주황색 LED가 켜집니다.

③ 아래의 화면은 [시작 화면]입니다.






④ 화면을 터치하실 때에는 화면 위에 다른 물체가 올라가 있지 않은 청결한 상태에서 하세요.

④ 시작화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

| 아이콘 | 이름          | 기능                           |
|-----|-------------|------------------------------|
|     | 설정 아이콘      | 터치 시 설정으로 이동 (날짜, 시간 등 입력)   |
|     | 전극 연결 상태 창  | 전극 연결 시 해당 아이콘이 전극의 아이콘으로 변경 |
|     | 충전 연결 상태 창  | 충전 연결 시                      |
|     | 날짜, 시간 표시 창 | 설정 창에서 설정 가능                 |
|     | 배터리 상태 창    | 배터리의 충전 상태 표시                |
|     | Next 버튼     | 터치 시 다음 화면으로 진행              |


## [날짜 및 시간 설정하기]

제품 사용 전, 날짜 및 시간을 설정하는 과정입니다.

- ①  아이콘을 터치하세요.
- ② 해당 칸을 터치한 후, 오른쪽 숫자 패드의 **DEL** 버튼을 이용 해 기존의 숫자를 지우고, 숫자 전극을 터치 해 [일 / 월 / 년]과 [시(24시) / 분 / 초]를 입력하세요.  
※ 왼쪽의 아이콘을 터치 해 입력 순서를 [년 / 월 / 일] 또는 [일 / 월 / 년]로 정할 수 있습니다. 정해진 순서는 제품 사용 전 과정에 모두 같은 순서로 입력하게 됩니다.  
※ 초기 설정은 [일 / 월 / 년] 순으로 되어 있습니다.
- ③ 입력 완료 후 오른쪽 하단의  아이콘을 터치하면 설정이 저장됩니다.
- ④  아이콘을 터치하면 시작 화면으로 돌아갑니다.

## [개인 설정 입력하기]

- ① 시작 화면에서 우하단의  아이콘을 터치하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

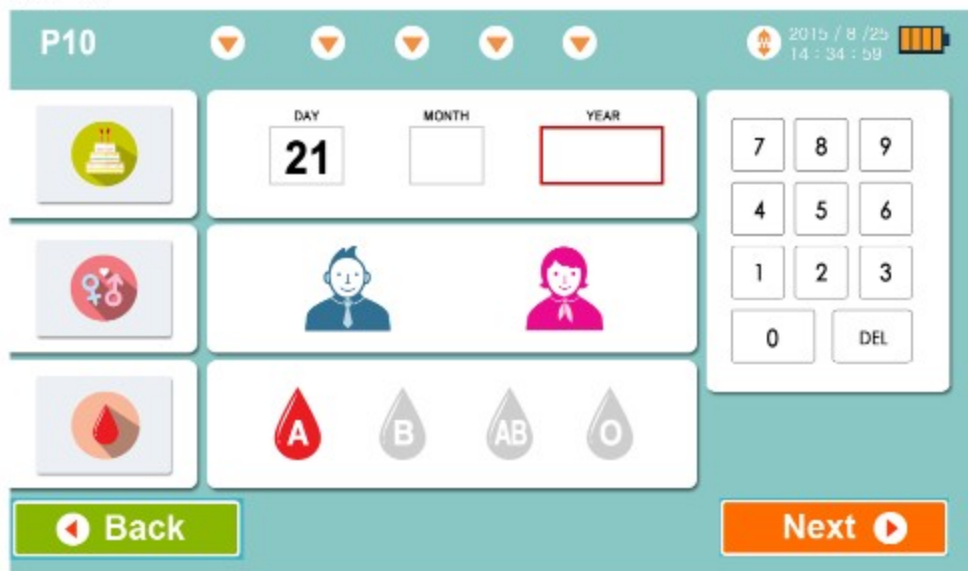

The image shows a personal settings screen with a teal background. At the top left, it says 'P10' and has five dropdown arrows. At the top right, it shows the date '2015 / 8 / 25', time '14 : 34 : 59', and a battery icon. The screen is divided into three rows of settings:

- Row 1: A birthday icon (cake) on the left, and three input fields for DAY (containing '21'), MONTH, and YEAR (with a red border) on the right.
- Row 2: A gender icon (male/female) on the left, and two person icons (male and female) on the right.
- Row 3: A blood type icon (blood drop) on the left, and four buttons for blood types: A, B, AB, and O.

At the bottom, there is a green 'Back' button on the left and an orange 'Next' button on the right.

- ② 오른쪽의 [숫자 패드]를 이용 해 사용자의 생년월일 (양력)을 입력합니다.  
※ 초기 설정 시 [일 / 월 / 년] 순으로 되어 있습니다.




- ③ **남성** 또는 **여성**의 아이콘을 터치 해 사용자의 **성별**을 입력합니다.
- ④ **혈액형 아이콘**을 터치 해 사용자의 **혈액형**을 입력합니다.
- ⑤ 오른쪽의  아이콘을 터치하면 설정이 저장되고, 다음 화면으로 넘어갑니다.
- ⑥ 해당 화면에서 언제든지  아이콘을 터치하면 시작화면으로 돌아갑니다.

## [개인 사용 기록 확인하기]

위의 [개인 설정 입력하기]를 완료 한 후 1회라도 사용 한 경우가 있다면, 이 기록은 저장되어 유지됩니다. 예를 들어, **1981년 7월 9일 생 B형의 남자의 경우 1회 사용**이 있으며, **1981년 11월 27일 생 A형 여성의 경우 10회 사용**이 있으면, 이는 **서로 따로 기록**되어, 개인의 사용 기록을 확인할 수 있습니다. 이 기록을 남기기 위해서는 제품 사용 시 타이머가 0이 될 때까지 프로그램을 사용해야 합니다.

- ① 15분 프로그램을 15분 동안 사용했을 경우: **사용 기록이 저장 됨.**
- ② 15분 프로그램을 사용하다가 10분 후 제품을 껐을 때: **사용 기록이 저장되지 않음.**

개인 사용 기록을 확인할 수 있는 화면의 예는 아래와 같습니다.

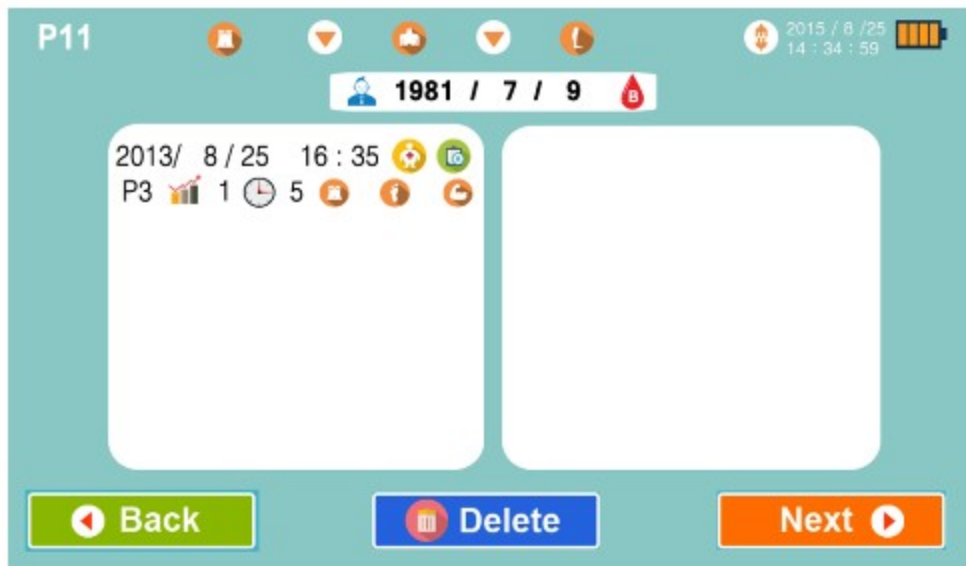

### 해당 화면의 각 아이콘의 표시 및 의미



[현재 본체와 연결되어 있는 전극의 위치와 종류]

예시에서는, 왼쪽부터 1번에 복부, 3번에 가슴, 5번에 다리 전극이 연결되어 있는 상태입니다.



[현재 설정되어 있는 사용자의 정보]

예시에서는, 왼쪽부터 남성 / 1981년 7월 9일 생 / 혈액형 B를 의미하고 있습니다.



**[이전에 사용한 기록]**

위의 예시에서는, 2015년 8월 25일 16시 35분에 II, 자동 모드로 프로그램은 P3, 강도 1, 사용 시간 5분으로 복부, 발, 팔 전극을 사용했음을 표시하고 있습니다.

해당 기록은 사용 시 마다 누적됩니다.



**[기록 삭제]**

현재 사용자의 누적된 기록 전부를 삭제합니다.


① 입력 완료 후 오른쪽 하단의  아이콘을 터치 하면 프로그램 선택 화면으로 이동합니다..

②  아이콘을 터치하면 이전 화면으로 돌아갑니다.

## [본체와 전극 연결하기]

본 제품을 사용하기 위해서는 본체와 전극을 연결한 후, 전극을 신체에 부착 해야 합니다.

본체의 전극 연결부는 제품의 상단, 충전 연결부의 옆에 있습니다.

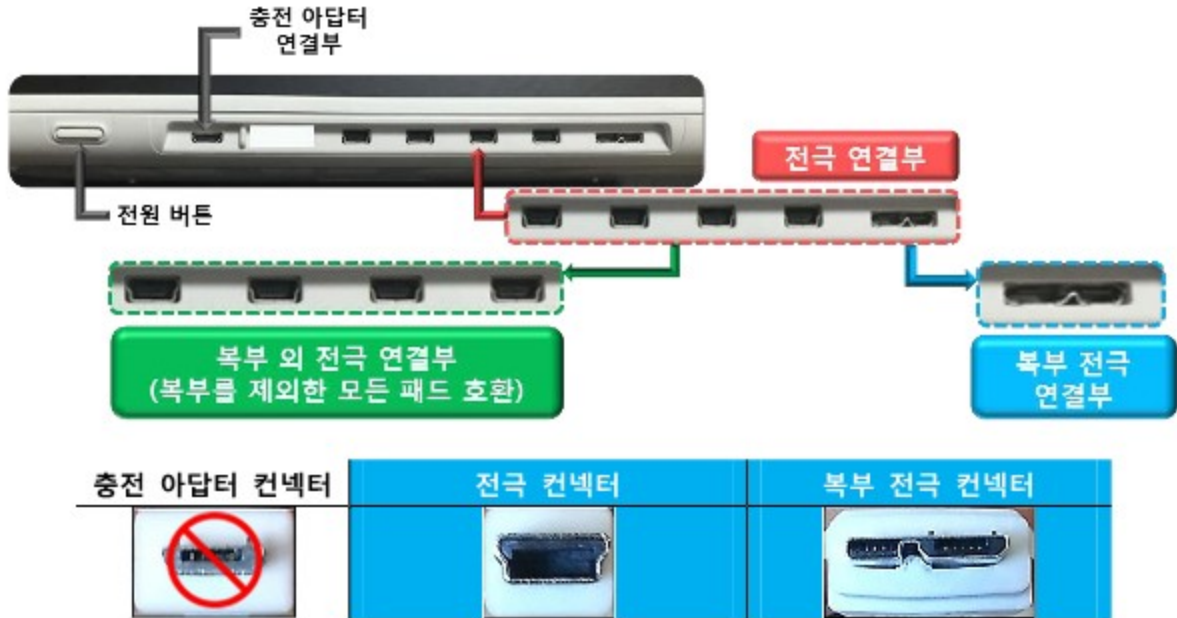

① 전극 연결부는 총 5개가 있으며, 그 중 1개의 **복부 전극 전용 연결부**와, 4개의 **일반 전극 연결부**가 있습니다. 4개의 **일반 전극 연결부**에는 복부 전극을 제외한 모든 전극을 사용할 수 있으며, 전극이 정상적으로 연결 된 경우 제품이 전극을 인식 해 아래와 같이 화면의 상단에 전극의 아이콘이 나타나게 됩니다.



위의 예시에서는, 왼쪽부터 **1번**에 **복부**, **3번**에 **가슴**, **5번**에 **다리** 전극이 연결되어 있는 상태입니다.

② 전극을 연결할 때는, 삽입부가 수직이 되도록 삽입 해 주시기 바랍니다.

③ 전극 연결 시, 삽입부의 모양을 꼭 확인하십시오.

※ 아답터 및 전극을 연결하실 때에는 지정된 정확한 위치에 연결 해 주시기 바랍니다.

※ 소비자의 연결 부주의로 인한 파손에 의한 수리는 수리 비용이 청구됩니다.


④ 전극의 연결은 언제라도 가능합니다.

⑤ 화면에 표시되는 전극 아이콘은 다음과 같습니다.



## [모드 선택]

사용하고자 하는 모드를 선택하는 화면입니다. 기본 화면은 아래와 같습니다.

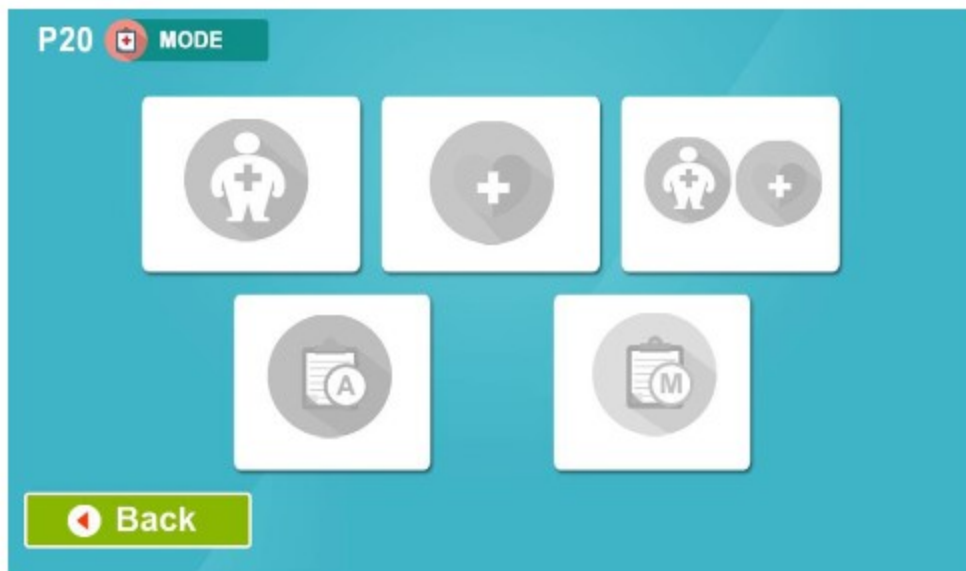

## 주요 아이콘 소개



모드 선택 아이콘




자동 (AUTO) 아이콘



수동 (Manual) 아이콘

상단의 3개 모드 중 하나를 선택하고, 하단의 두 개의 아이콘 중 하나를 터치 해 자동 (A) / 수동 (M) 선택을 합니다. 선택 된 아이콘은 컬러로 바뀌며, 모드와 자동 / 수동 선택이 끝나면 아래 화면과 같이 우측 하단에 다음 화면으로 가는 버튼이 생성됩니다.

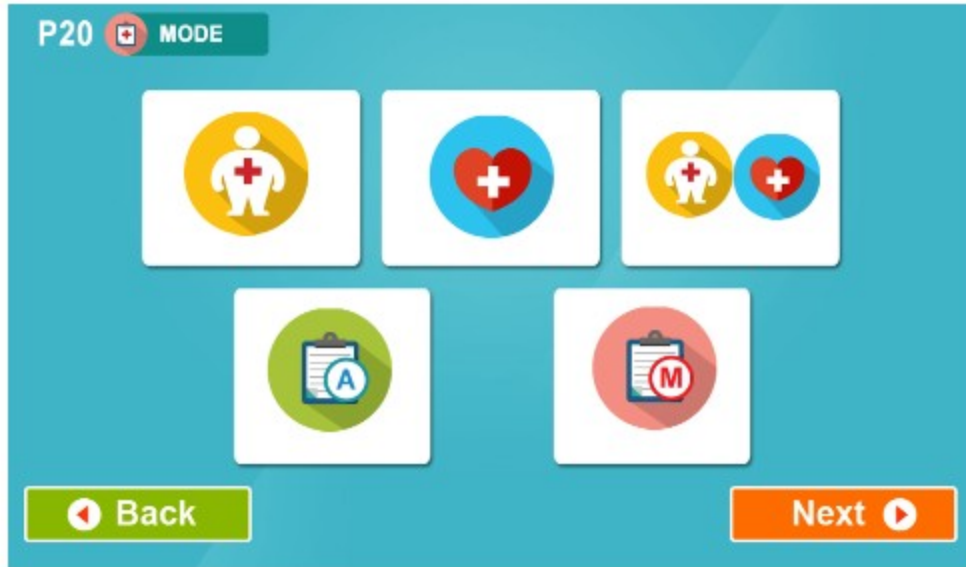


자동 설정과 수동 설정의 차이는 아래와 같습니다.

|    | 자동 설정                          | 수동 설정       |
|----|--------------------------------|-------------|
| 강도 | 모든 부위 일괄 조절<br>(부위 별 개별 조절 불가) | 각 부위별 개별 조절 |
| 시간 | 모든 부위 일괄 조절<br>(부위 별 개별 조절 불가) | 각 부위별 개별 조절 |



## [자동 설정 모드의 사용 방법]

자동 설정 모드는 각 전극의 강도 및 시간을 한꺼번에 조절할 수 있는 모드입니다. 아래는 자동 설정 모드로 작동 시 화면입니다.

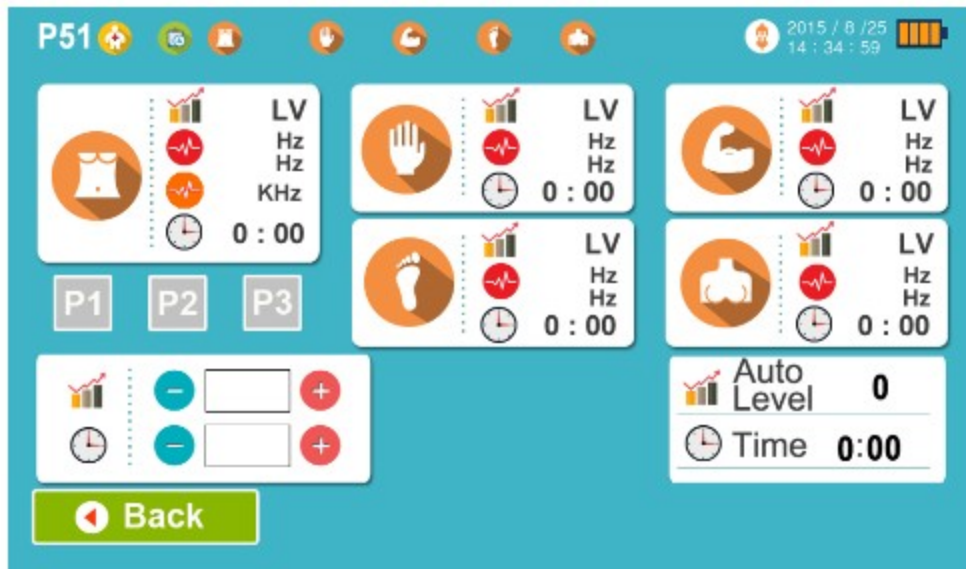

### 1) 주요 아이콘의 의미

| 위치                     | 아이콘 | 의미                          |
|------------------------|-----|-----------------------------|
| 화면의 우측 상단              |     | 설정된 모드 표시                   |
| 화면의 우측 중앙              |     | 프로그램 선택.                    |
| 전극 표시부, 레벨 표시부, 레벨 설정부 |     | 현재의 강도 표시                   |
| 전극 표시부, 시간 표시부, 시간 설정부 |     | 남은 시간 표시                    |
| 프로그램 선택 아이콘 아래         |     | 프로그램의 강도, 시간 설정             |
| 우측 하단                  |     | 프로그램의 강도와 남은 시간 표시          |
| 전극 표시부 상단 전극 연결 표시부    |     | 연결되어 있는 전극 표시, 전극의 신체 접촉 표시 |

## 2) 사용 순서

① 전극을 연결하고, 사용하고자 하는 전극을 적당한 밴드를 이용해 신체에 부착하십시오.

- ※ 전극은 반드시 피부에 밀착되어야 하며, 젤 등을 함께 사용하십시오.
- ※ 가슴 전용 전극, 발 전극, 팔 전극은 각각 같은 색의 전선을 동일한 부위에 사용하세요.  
(오른쪽 다리: 분홍색 전선 전극 / 왼쪽 다리: 흰색 전선 전극)
- ※ 밴드는 강하게 조여 사용하십시오.
- ※ 손 전용 전극의 경우, 전극을 손에 가볍게 쥐어 사용하십시오.
- ※ 가슴 전용 전극의 경우, 초승달 형 전극을 가슴의 아래 부분 브래지어의 안쪽에 넣어 사용하시고, 원형 전극은 뒷면의 클립을 브래지어의 어깨 끈에 고정 해 사용하십시오.  
브래지어를 이용 해 가슴 전용 전극을 사용하시는 경우 전극이 밀착되도록 브래지어의 끈을 조절 하십시오.

② 

화면 우측 중앙의 프로그램 선택 아이콘을 터치 해 프로그램을 선택하십시오. 숫자가 높을 수록 느낌과 펄스폭은 증가합니다.

③ 화면의 우측 하단의 시간 설정을 통해 사용하고자 하는 시간을 5분 단위로 입력 하십시오.

- ※ 최대 설정 시간: 60분
- ※ 처음 설정 시 15분부터 설정할 수 있습니다만, 작동 후에 5분 또는 10분으로 시간을 변경할 수 있습니다.

④ 프로그램 설정과 시간 설정이 완료 되면, 좌측 하단에 START (시작) 아이콘이 나타납니다.

- ※ 아이콘이 나타나지 않는 경우는 프로그램 및 시간 설정이 모두 완료 되었는지 확인 해 주세요.

⑤ START (시작) 아이콘을 터치하면, 설정된 시간이 줄어들면서 프로그램이 시작됩니다.

이 때 강도는 0으로, 왼쪽 중앙부의 강도 조절을 통해 강도를 조절할 수 있습니다.

- ※ 강도를 한꺼번에 너무 많이 올리지 마세요. 한 단계씩 천천히 올려주세요.
- ※ 기분 좋은 정도의 강도가 가장 적당합니다. 너무 많이 올리지 마세요.

⑥ 정해진 규칙에 따라, 각 전극에서 주파수가 발생합니다.

⑦ 작동 중에는 좌측 하단에 PAUSE (잠시 멈춤) 아이콘이 생성되며, 사용 중 잠시 멈출 수 있습니다. 이 때 남은 시간 역시 멈추고, 다시 시작하면 계속해서 진행됩니다.


⑧ 화면의 중앙 하단에는 LCD OFF 아이콘이 생성되며, 터치하면 LCD가 꺼지며 전력을 절약할 수 있습니다. LCD가 꺼진 상태에서 언제라도 화면을 터치하면 화면이 다시 켜 집니다.

⑨ 작동이 시작된 후 화면의 중앙 하단에는 STOP (종료) 아이콘이 생성되며, 터치하면 언제라도 작동을 멈춥니다. 이 때 남은 시간은 리셋되어 [0:00] 이 됩니다.

### ⑤, ⑦~⑨ 관련 아이콘

| START (시작)                                                                        | PAUSE (잠시 멈춤)                                                                     | LCD OFF (화면 꺼짐)                                                                    | STOP (종료)                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

⑩ 본 제품은 주기적으로 전극과 신체의 밀착 상태를 확인 해 밀착이 되지 않은 경우 일시 정지 되고 이를 사용자에게 알려 사용자가 전극의 밀착을 확인할 수 있도록 설계되어 있습니다. 아래의 아이콘을 확인 해 주시기 바랍니다.


| 아이콘 예시                                                                              | 의미                                         | 적용                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|  | 복부 전극은 신체에 밀착되어 있으나, 발 전극은 신체에 밀착되어 있지 않음. | 발 전극의 밀착 상태 확인 요망. |

프로그램 시작 후 일정 시간이 지나게 되면 사용 중 밀착이 되어 있는 경우는 전극 아이콘이 녹색으로, 그렇지 않은 경우는 흰색으로 표시됩니다.

## [수동 설정 모드의 사용 방법]

수동 설정 모드는 사용 중인 전극의 개별 강도 및 시간을 설정할 수 있는 모드입니다.

수동 설정 모드와 자동 설정 모드의 시작 화면은 거의 비슷합니다. 다만, 우측 상단의 모드 아이콘과 좌측 하단의 강도 및 시간 표시부에 차이가 있습니다.

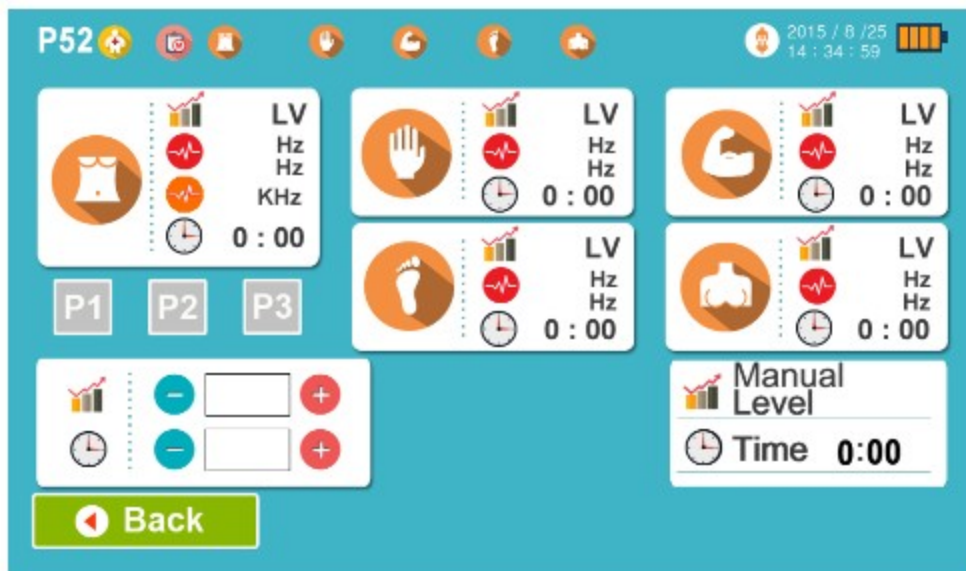

### 1) 주요 아이콘의 의미

| 위치                        | 아이콘 | 의미                             |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| 화면의 우측 상단                 |     | 설정된 모드 표시                      |
| 화면의 우측 중앙                 |     | 프로그램 선택.                       |
| 전극 표시부, 레벨 표시부,<br>레벨 설정부 |     | 현재의 강도 표시                      |
| 전극 표시부, 시간 표시부,<br>시간 설정부 |     | 남은 시간 표시                       |
| 프로그램 선택 아이콘 아래            |     | 프로그램의 강도, 시간 설정                |
| 우측 하단                     |     | 프로그램의 강도와 남은 시간 표시             |
| 전극 표시부<br>상단 전극 연결 표시부    |     | 연결되어 있는 전극 표시,<br>전극의 신체 접촉 표시 |



## 2) 사용 순서

① 전극을 연결하고, 사용하고자 하는 전극을 적당한 밴드를 이용해 신체에 부착하십시오.


※ 전극은 반드시 피부에 밀착되어야 하며, 젤 등을 함께 사용하십시오.

※ 가슴 전용 전극, 발 전극, 팔 전극은 각각 같은 색의 전선을 동일한 부위에 사용하세요.  
(오른쪽 다리: 분홍색 전선 전극 / 왼쪽 다리: 흰색 전선 전극)

※ 밴드는 강하게 조여 사용하십시오.

※ 손 전용 전극의 경우, 전극을 손에 가볍게 쥐어 사용하십시오.

※ 가슴 전용 전극의 경우, 초승달 형 전극을 가슴의 아래 부분 브래지어의 안쪽에 넣어 사용하시고, 원형 전극은 뒷면의 클립을 브래지어의 어깨 끈에 고정 해 사용하십시오.  
브래지어를 이용 해 가슴 전용 전극을 사용하시는 경우 전극이 밀착되도록 브래지어의 끈을 조절 하십시오.

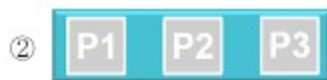

화면 우측 중앙의 프로그램 선택 아이콘을 터치 해 프로그램을 선택하십시오. 숫자가 높을 수록 느낌과 펄스폭은 증가합니다.

③ 화면의 우측 하단의 시간 설정을 통해 사용하고자 하는 시간을 5분 단위로 입력 하십시오.

※ 최대 설정 시간: 60분

※ 처음 설정 시 15분부터 설정할 수 있습니다만, 작동 후에 5분 또는 10분으로 시간을 변경할 수 있습니다.

④ 프로그램 설정과 시간 설정이 완료 되면, 좌측 하단에 START (시작) 아이콘이 나타납니다.

※ 아이콘이 나타나지 않는 경우는 프로그램 및 시간 설정이 모두 완료 되었는지 확인 해 주세요.

⑤ START (시작) 아이콘을 터치하면, 설정된 시간이 줄어들면서 프로그램이 시작됩니다.

이 때 강도는 0입니다.

⑥ 각 전극의 강도 및 시간을 설정하고자 하실 때는 아래의 예시와 같이 변경하고자 하는 전극의 아이콘 박스를 터치하세요.




⑦ 전극 아이콘의 박스를 터치하면 아래의 그림과 같이 해당 아이콘 박스에 표시가 됩니다.



⑧ 위의 상태가 되면, 전극 아이콘 박스 모음 아래에 강도 및 시간 설정 화면이 나타납니다. 원하는 강도와 시간을 설정 후 [O] 아이콘을 터치 해 설정을 완료 하십시오.

강도의 경우 높이거나 낮추면 잠시동안 변경 된 강도로 주파수가 출력됩니다. 강도를 한꺼번에 너무 많이 높이지 마시고, 강도를 1 올린 후 약 5초 정도 주파수의 강도를 피부로 직접 확인하시고 올리세요.

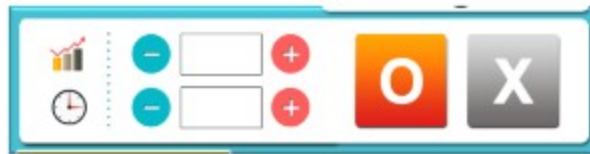

⑨ 정해진 규칙에 따라, 각 전극에서 주파수가 발생합니다.

⑩ 작동 중에는 좌측 하단에 PAUSE (잠시 멈춤) 아이콘이 생성되며, 사용 중 잠시 멈출 수 있습니다. 이 때 남은 시간 역시 멈추고, 다시 시작하면 계속해서 진행됩니다.

⑪ 화면의 중앙 하단에는 LCD OFF 아이콘이 생성되며, 터치하면 LCD가 꺼지며 전력을 절약할 수 있습니다. LCD가 꺼진 상태에서 언제라도 화면을 터치하면 화면이 다시 켜 집니다.


⑫ 작동이 시작된 후 화면의 중앙 하단에는 STOP (종료) 아이콘이 생성되며, 터치하면 언제라도 작동을 멈춥니다. 이 때 남은 시간은 리셋되어 [0:00] 이 됩니다.

#### ⑤, ⑨~⑫ 관련 아이콘

| START (시작) | PAUSE (잠시 멈춤) | LCD OFF (화면 꺼짐) | STOP (종료) |
|------------|---------------|-----------------|-----------|
|            |               |                 |           |



⑩ 본 제품은 주기적으로 전극과 신체의 밀착 상태를 확인 해 밀착이 되지 않은 경우 일시 정지 되고 이를 사용자에게 알려 사용자가 전극의 밀착을 확인할 수 있도록 설계되어 있습니다. 아래의 아이콘을 확인 해 주시기 바랍니다.

| 아이콘 예시                                                                            | 의미                                                | 적용                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <p>복부 전극은 신체에 밀착되어 있으나, 발 전극은 신체에 밀착되어 있지 않음.</p> | <p>발 전극의 밀착 상태 확인 요망.</p> |

## 제품 보관 시 주의 사항

- ① 본 제품의 전극의 경우 일부 방수 처리 되었으나, 물에 담그거나 씻는 행위를 하지 마십시오. 에틸 알코올 등을 이용 해 닦아서 세척 해 주시기 바랍니다.
- ② 본 제품의 본체의 경우 방수 기능이 되어 있지 않습니다. 습기 등에서 멀리 해 주시기 바랍니다.
- ③ 본 제품 보관 시 어린이, 노약자 또는 심신이 미약한 자 등 제품의 올바른 사용이 어려울 것이라고 의심되는 경우와 멀리 해 주시기 바랍니다.
- ④ 본 제품을 보관 시에는 반드시 청결을 유지하고, 정해진 가방에 보관 해 주세요.
- ⑤ 화기, 고온에서 멀리 해 주시기 바랍니다.
- ⑥ 제품을 전자레인지 등에 넣고 돌리지 마십시오.
- ⑦ 본 제품은 물리적, 화학적 충격 및 기타 충격에 매우 약한 첨단 제품입니다. 높은 곳에서 떨어뜨리지 마시고, 전극 및 전용 충전 아답터 등의 전선을 잡아당기지 마십시오.
- ⑧ 본 제품에 파손이 있을 시 반드시 사용을 중지하십시오.
- ⑨ 보증 기간 내 수리 요청 시는 물론 소비자 과실, 보증 기간 이후 수리 요청 시에도 반드시 모든 필수 기록이 기록 된 품질 보증서를 함께 제출하셔야 합니다.
- ⑩ 소비자 과실로 인한 파손은 보증 기간 내의 경우에도 수리 비용이 청구될 수 있습니다.

## 【 품질 보증서 】

당사는 소비자 피해 보상 규정에 따라 구매 후 1년 동안 품질을 보증합니다.

보증 기간이 끝난 제품의 경우 수리 비용은 본사 규정에 따라 실비로 처리 해 드립니다.

사용자 부주의로 인한 제품의 고장 발생 시에는 보상이 되지 않습니다.

|       |                             |      |
|-------|-----------------------------|------|
| 제품 정보 | 제품명: MK-010 프리웨이브 (FreeWAV) |      |
|       | 제품 번호 (S/N):                |      |
| 고객 정보 | 고객명:                        | 전화:  |
|       | 주소:                         |      |
| 판매 정보 | 판매처:                        | 전화:  |
|       | 판매일:                        | 판매자: |
| 기타    |                             |      |

### 【 무료 서비스 】

- ◆ 구입 후 1년 (제품 보증 기간) 이내에 제품 하자로 인한 고장 발생 시 무상 수리를 받으실 수 있습니다.
- ◆ 수리 요청 시 위의 정보가 기재된 품질 보증서를 동봉하지 않으시는 경우, 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

### 【 유료 서비스 】

- ◆ 구입 후 1년 (제품 보증 기간) 이후의 고장 발생 시 그에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.
- ◆ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 물류비 및 인건비 등이 부과되므로, 반드시 사용 설명서를 읽어주시고, 제품 구매처나 판매 업체, 생산 업체에 우선 문의 해 주시기 바랍니다.
- ◆ 다음과 같이 소비자 과실로 인해 고장이 난 경우에는 제품 보증 기간 내에도 수리 비용이 청구될 수 있습니다.
  - 소비자의 사용 과실로 인해 충격, 습기, 고열, 고압 전류 등에 노출되어 고장 발생 시.
  - 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시.
  - 임의로 수리, 개조, 분해한 흔적이 있을 시.
  - 사용 설명서의 정해진 사용법을 준수하지 않아 고장 발생 시.
  - 기타 고장의 원인이 제품 자체의 결함으로 인한 것이 아닐 시.
- ◆ 품질 보증서를 분실하시는 경우에도 유상으로 수리가 가능하며, 보증서의 분실로 인한 책임은 소비자에게 있습니다.

### 【 A/S 및 사후 서비스 연락처 】

